

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung CLINIFLEX® LFL

Symbolerklärung:

REF	Artikelnummer Zeigt die Katalognummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann
MD	Medizinprodukt Zeigt an, dass es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Medizinprodukt handelt
CE	CE-Kennzeichen Mit einer CE-Kennzeichnung bestätigt ein Hersteller, dass sein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht und ein vorschriftsgemäßes Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen hat.
i	Gebrauchsanweisung beachten Zeigt dem Anwender an, dass es notwendig ist, die Gebrauchsanweisung zu beachten
!	Achtung Warnhinweise Lesen Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanweisung
LOT	Chargenbezeichnung Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann
🕒	Verwendbar bis Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf
🏭	Hersteller Zeigt den Hersteller des Medizinprodukts an
📦	Vertreiber (Händler) Zeigt das Unternehmen an, welches das Medizinprodukt am Ort vertreibt
UDI	eindeutige Produktidentifizierung Zeigt einen Träger an, der Informationen zu einer eindeutigen Produktidentifizierung (UDI) enthält
☔	Trocken aufbewahren Zeigt ein Medizinprodukt an, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss
☀️	Vor Sonnenlicht schützen Zeigt ein Medizinprodukt an, das vor Lichtquellen geschützt werden muss

Kontaktdaten:

biocon
Medizintechnik GmbH
Triebweg 1 - 3
63933 Mönchberg | Germany

inframed
medical GmbH
Industriestr. 8
61273 Wehrheim | Germany
Tel. 06081 56014 | Fax 06081 57083
Email: info@inframed.de

CLINIFLEX® LFL

Leerflasche mit Schraubdeckel und Aufhängeöse zur Applikation von Flüssigkeit bei enteral ernährten Patienten

- Mehrfach verwendbar, bis zu 30 Zyklen innerhalb des Haltbarkeitszeitraums.
- Füllmenge 1000 ml (1 Liter)
- Skalierung von 200 bis 1000 ml
- Weithalsanschluss mit Gewinde Rd 40 x 4

Artikel-Nr. 52598-001: PZN 07369843 (VE: 12 Stck.)
Artikel-Nr. 52598-004: PZN 16223914 (VE: 4 Stck.)



Allgemeine Informationen

Die CLINIFLEX® Leerflasche ist für alle Patienten vorgesehen, die im Rahmen eines enteralen Ernährungskonzepts mit Flüssigkeit versorgt werden – unabhängig von Alter, Gewicht, Gesundheitszustand, Geschlecht oder anderen spezifischen Merkmalen.

Die Anwendung kann durch Pflegefachkräfte oder durch eingewiesene Pflegekräfte erfolgen.

Das Produkt kann im häuslichen Bereich durch Laien angewendet werden, wenn diese durch Pflegefachkräfte eingewiesen worden sind.

Achten Sie bitte vor dem Gebrauch auf die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

! **Sicherheitshinweise**

- Die Leerflasche nur in Verbindung mit einem Überleitsystem mit Belüftung verwenden!
- Während der Reinigung und Trocknung Flasche nicht mechanisch belasten (keinen Druck ausüben, nicht einklemmen)!
- Voraussetzung für die Wiederverwendung ist, dass die Flasche und der Schraubdeckel vollkommen sauber sind, da ansonsten das mikrobielle Kontaminationsrisiko erheblich ansteigt!
- Nicht mit starken Laugen oder Säuren reinigen!
- Reinigungsmittel bewirken nach häufigem Spülen eine Verringerung der Materialfestigkeit, so dass die Flasche eine begrenzte Haltbarkeitsdauer von maximal 30 Reinigungszyklen hat.
- Flasche verwerfen bei Beschädigungen, Kratzern, Eintrübungen, Verfärbungen und erkennbaren Haarrissen.
- Gefüllte Flaschen vor Nutzung stehend lagern!
- Tee darf nicht kochend heiß, sondern nur in abgekühltem Zustand in die Flasche gefüllt werden! Nicht für die Mikrowelle geeignet!
- Es ist auf zeitnahe Verabreichung zu achten! Die maximale Aufbewahrungsdauer von Tee oder Wasser in der mit dem Schraubdeckel verschlossenen Leerflasche beträgt 12 Stunden.
- Die Leerflasche nach dem ersten Gebrauch nicht länger als 30 Tage nutzen. Sie darf nach dem auf dem Kartonetikett aufgedruckten Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.

6072-001 Rev. 04 (10.2025)

Produktbeschreibung/Verwendung

Bei der CLINIFLEX® Leerflasche handelt es sich um einen leeren, nicht vorgefüllten Behälter zur ausschließlichen Gabe von Flüssigkeiten, wie stilles Wasser oder Tee innerhalb des Ernährungskonzeptes zur enteralen Ernährungstherapie.

Das Volumen der CLINIFLEX® Leerflasche lässt sich dank des transparenten Materials und der Skalierung gut kontrollieren. Die Handhabung ist durch die ergonomische Form, die große Einfüllöffnung und die integrierte Aufhängevorrichtung optimal.

- Die Flasche und der Schraubdeckel können gereinigt und mehrfach verwendet werden.
- Zur Aufhängung am Infusionsständer ist die Flasche mit einer Aufhängeöse versehen.
- Vor jedem Gebrauch Flasche und Schraubdeckel gründlich reinigen, siehe Kapitel Reinigung.
- Kompatibel mit Pumpen- und Schwerkraftüberleitsystemen für Weithalsflaschen.

Hinweis: Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der CLINIFLEX®-Leerflasche sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden. In Deutschland ist dies das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Reinigung:

Die Reinigung kann manuell oder in Haushalts- oder Industriespülmaschinen mit herkömmlichen Reinigungsmitteln erfolgen.

! Keine Mittel mit scheuernden Substanzen verwenden!

Spülmaschinengeeignet bis 95° C

Lager- und Transportbedingungen:

- Trocken lagern
- Vor Sonnenlicht schützen

Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt gemäß den vor Ort geltenden Richtlinien bzw. dem Abfallkonzept der medizinischen Einrichtung oder über den Restmüll.

